

3Shape TRIOS Core

Häufig gestellte Fragen



Vorstellung von 3Shape TRIOS Core

Was ist 3Shape TRIOS Core?

3Shape TRIOS Core ist eine grundlegende TRIOS-Scantechnologie, die zu einem erschwinglichen Preis erhältlich ist und für den Versand ans Labor entwickelt wurde.

So wie jeder andere TRIOS-Scanner ist TRIOS Core präzise, schnell und einfach zu bedienen. Er wird mit den wesentlichen Tools und Workflows für ein nahtloses Scan- und Sendeerlebnis geliefert. Verbinden Sie sich einfach mit einem unserer mehr als 25.000 Partner, scannen Sie Ihren Patienten und senden Sie den Auftrag mit einem Klick.

Ist TRIOS Core auch in einer drahtlosen Ausführung erhältlich?

Nein. TRIOS Core ist nur in einer kabelgebundenen Ausführung erhältlich?

Wie viele Aufsätze sind in der TRIOS 3 Box enthalten?

In der Box erhalten Sie 5 Scanaufsätze und einen Schutzaufsatz für den Scanner.

Sind TRIOS 3-Aufsätze mit TRIOS 3 und TRIOS Core kompatibel?

Ja, sie sind sowohl mit TRIOS 3 als auch mit TRIOS Core kompatibel.

Wie groß sind die TRIOS 3 Aufsätze? Sind diese in verschiedenen Größen erhältlich?

Wir bieten nur eine Aufsatzgröße mit den folgenden Maßen (HxBxL) an: 20 x 20.5 x 96 mm.

Sind TRIOS Core Scans für Invisalign zugelassen?

Nein. TRIOS 3 ist der einzige TRIOS-Scanner, der Scans an Invisalign senden kann.

Besteht für TRIOS Core ein obligatorisches Abonnement?

Nein. Jeder neue TRIOS-Scanner wird derzeit mit TRIOS Care für das erste Jahr kostenlos geliefert. TRIOS Care ist ein umfassender Serviceplan, der personalisierte Onboarding-Programme, eine 5-Jahres-Garantie, Express-Austausch, 10 TB Cloud-Speicher und vieles mehr beinhaltet.

Nach Ablauf des ersten kostenlosen Jahres, können Sie TRIOS Care weiter nutzen oder auf TRIOS Only, einen Servicevertrag für die grundlegenden Scanfunktionen, wechseln. Erfahren Sie hier mehr über TRIOS Care [hier](#).

Was ist der Unterschied zwischen TRIOS 3- und TRIOS Core?

TRIOS Core ist unser Einstiegs-Intraoralscanner mit Fokus auf den Basisworkflow, d.h. Scannen eines Patienten und Senden des Auftrags an ein bevorzugtes Labor.

Was bedeuten die verschiedenen Leuchten am TRIOS Core Pod?

Die LED-Leuchte am TRIOS Core Pod zeigt Ihnen an, ob Ihr TRIOS 3 ausreichend mit Strom versorgt wird und einsatzbereit ist. Je nach Status sehen Sie entweder eine stabile oder blinkende grüne oder blaue Leuchte.

Farbe	Erläuterung
Grün	Einsatzbereit.
Blau	Unzureichende Stromversorgung, versuchen Sie es mit einem anderen USB-C-Anschluss an Ihrem PC.
Blinkendes Grün	Warten auf den Anschluss an den PC oder Scanner
Blinkendes Blau	Fehler: Entfernen Sie das USB-C-Kabel vom PC und vom Pod und schließen Sie es gemäß den Anweisungen erneut an.

3Shape TRIOS Core

Häufig gestellte Fragen



Scanner-Konfigurationen

Welche Konfigurationen sind mit TRIOS Core verfügbar?

TRIOS Core ist nur als Pod-Konfiguration erhältlich.

Kann Move+ zu einer bestehenden TRIOS Core-Pod-Konfiguration hinzugefügt werden?

Nein. TRIOS Core ist nicht kompatibel mit Move+.

Gibt es bestimmte PC-Anforderungen, auf die ich achten muss?

TRIOS Core benötigt keine externe Stromversorgung, denn er Strom vom PC bekommt. Er ist mit den von 3Shape empfohlenen Laptops kompatibel.

Wenn Sie keine 3Shape-PCs haben, empfehlen wir Ihnen, einen PC mit gleichwertigen Parametern und einem USB-C-Anschluss mit einer Mindestleistung 15 W zu kaufen. Alle IT-Geräte von Dritten müssen nach IEC 62368-1 oder IEC 60950-1 zertifiziert sein. Weitere Informationen zu 3Shape-Laptops erhalten Sie von Ihrem Händler.

Ist TRIOS Core mit Mac-Computers kompatibel?

Nein, TRIOS-Scanner und andere 3Shape-Produkte laufen auf einem Windows-System.

Holen Sie das Maximum aus Ihrem TRIOS Core mit 3Shape Unite heraus

Was ist 3Shape Unite?

3Shape weiß, dass ein qualitativ hochwertiger Abdruck nur der erste Schritt zu einem erfolgreichen

Behandlungsergebnis für den Patienten ist. TRIOS liefert Ihnen zwar präzise Scans, aber 3Shape Unite, eine mit dem TRIOS gelieferte Plattform, eröffnet den Zahnärzten bei der Arbeit *mit* diesen Scans eine ganze Welt von Möglichkeiten.

Was kann ich in 3Shape Unite tun?

3Shape Unite ist eine offene Plattform, die es Ihnen ermöglicht, die digitale Zahnheilkunde an Ihre Bedürfnisse anzupassen, egal ob Sie die erstellten Scans an das Labor senden, das Design und die Herstellung in der Praxis mit 3Shape oder Partneranwendungen durchführen oder beide Methoden kombinieren möchten.

Mit welchen Laboren und Partnern kann ich in 3Shape Unite zusammenarbeiten?

Dank des Unite Stores von 3Shape können Sie Ihr Angebot mühelos erweitern und mithilfe von Tausenden Apps ganz einfach den richtigen Partner für eine Zusammenarbeit finden.

Über 25.000 3Shape Labore, mehr als 40 Praxisverwaltungssysteme und mehr als 100 weltbekannte Partner stehen Ihnen in folgenden Bereichen zur Verfügung: Clear Aligner, 3D-Druck und Fräsen, Patientenmanagement, Bildgebungssysteme, Schlafapnoe-Schienen, Design-Services und vieles mehr. Sie finden sie im Unite Store oder 3Shape Unite Cloud und können mit nur einem Klick mit ihnen in Kontakt treten.